

## Nano Repro SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

แบบตรวจหา แอนติเจนใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Professional use only)

ใบรับรองการประเมินที่ T 6400336



“โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาต”

size : 1 กล่อง บรรจุ 20 ชุดตรวจ

สินค้าชุดตรวจ ATK NanoRepro 1 กล่องประกอบด้วย

ไม้ Swap x 20

หลอดน้ำยาตรวจพร้อมฝาปิด x 20

เครื่องวัดผลตรวจ x 20

ฐานตั้งอุปกรณ์ x1

คู่มือการใช้งาน x1

## รายละเอียด

ชุดตรวจ ATK Professional use แบบแยงจุ่มก้นเพียง 1.5 เซนติเมตร ใช้ตรวจทางช่องจากจมูกด้านหน้า/ด้านในและช่องคอ เป็นชุดตรวจ ATK จากประเทศเยอรมนี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสากลยุโรป และ อย.ไทย (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

เหมาะสำหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์, โรงงาน ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม, บุคลากรทางการแพทย์และในสถานพยาบาลหรือคลินิก เวชกรรม, สถานดูแลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน, ร้านขายยา, ผู้ค้าส่ง, สถานที่ทดสอบต่างๆ

ชุดตรวจ ATK แบบ Professional use จะมีจำนวนบรรจุที่มากกว่า ชุดตรวจ ATK แบบ Home use ซึ่งความต่างที่นั่น คือก้าน swab ที่มีขนาดยาวกว่าและอ่อนตัว มีปริมาณของการบรรจุน้ำยาที่มากกว่า

## คุณสมบัติ

- สามารถเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหน้าได้โดยปราศจากความเจ็บปวด
- ความไว 97,2% และความจำเพาะสูง 98,4%
- ติดอันดับรายชื่อสหภาพยุโรปของการทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วของ COVID-19
- ติดอันดับในรายการ BfArM (AT317 / 20)
- การทดสอบการติดเชื้ออย่างเรียบง่าย
- แบบเร่งด่วนรู้ผลไวภายใน 10 - 20 นาที
- สามารถรับรู้เชื้อการกลายพันธุ์ได้
- ได้รับการรับรอง CE

## วิธีการใช้งาน

ทำความสะอาดมือ และพื้นที่ที่จะวางอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนที่อาจทำให้เกิดผลคลาดเคลื่อนได้  
ขั้นตอนแรก กรุณาศึกษาข้อมูลการใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย

ฉีกซองของแท่งตรวจและวางแท่งตรวจบนพื้นที่ราบ


นำก้านตรวจสอดปและสอดยอดก้านที่ซับน้ำได้เข้าไปในรูจมูก ความลึกประมาณ 1.5 เซนติเมตร และหมุนก้านตรวจโดยออกแรงพอสมควรประมาณ 5 รอบให้สัมผัสกับด้านในของโพรงจมูก เพื่อเก็บของเหลวในจมูกให้ติดมากับก้านตรวจและค่อยๆนำก้านตรวจออกจากจมูก ทำซ้ำเหมือนเดิมกับรูจมูกอีกด้านหนึ่ง

นำตัวหลอดน้ำยาตรวจมาเปิดฝาออก และนำก้านตรวจที่ได้ จุ่มลงในน้ำยา ขณะคนให้บีบปลายของก้านตรวจที่อยู่ในหลอดน้ำยาประมาณ 10-15 ครั้ง ก่อนนำออกจากหลอดให้ปาดน้ำยาที่ขอบหลอดเพื่อเอาน้ำยาและของเหลวออกจากก้านตรวจให้มากที่สุด ทิ้งก้านตรวจตามมาตรฐานของขยะพิษที่ปลอดภัย แล้วปิดฝาของหลอดค่อยๆหยดน้ำยาตรวจเบาๆ 3 หยดที่แท่งตรวจในจุดหลุมตรวจ

รอผลได้จากนั้น 10 - 20 นาที แต่ผลที่ออกมาหลังจาก 20 นาที อาจจะคลาดเคลื่อนและไม่น่าเชื่อถือ

ผล positive (บวก) จะมีสองขีดปรากฏขึ้น โดยความเข้มของขีดสีไม่สำคัญ แต่หนึ่งขีดจะแสดงที่ตัว C และอีกขีดจะแสดงที่ตัว T นั้นแสดงว่าของเหลวที่คุณตรวจมี Antigen ของไวรัสอยู่ที่บ้าน แล้วแจ้งหมอประจำตัวหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
ผล Negative (ลบ) จะมีขีดปรากฏเฉพาะที่ตัว C แสดงว่าของเหลวที่คุณตรวจไม่มี Antigen ของไวรัส หรือมี Antigen น้อยมากจนชุดตรวจจับไม่ได้ แสดงว่าผู้ตรวจไม่น่าจะได้รับเชื้อไวรัสโควิดในขณะนี้แต่ถึงอย่างนั้นถ้าคุณมีอาการหรือสงสัยว่าจะติดโควิด ช่วยอยู่บ้านและติดต่อหมอประจำตัว

Ungültig (คลาดเคลื่อน) ถ้าไม่มีขีดปรากฏขึ้นเลย หรือแสดงผลแค่ที่ตัว T นั้นแสดงว่ามีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นขณะทำการตรวจ คุณช่วยเช็คว่าคุณทำทุกขั้นตอนตามคู่มือการใช้งานหรือไม่และช่วยทำการตรวจซ้ำอีกครั้งโดยใช้อุปกรณ์ชุดใหม่ทั้งหมด

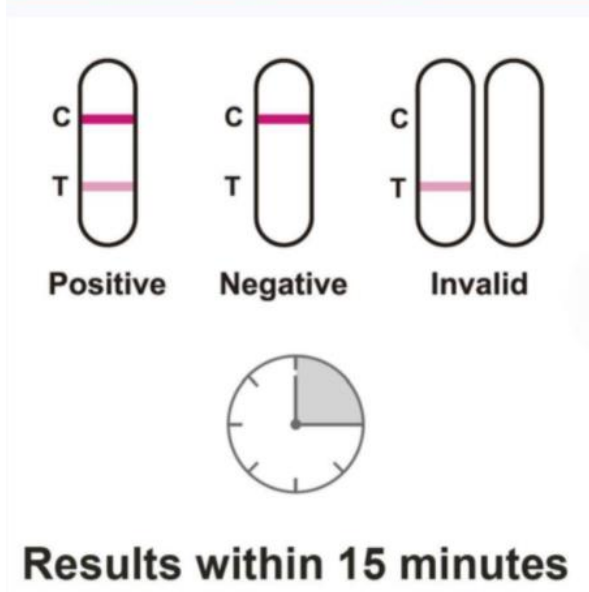

## รับรองจาก

ได้รับใบประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ T 6400336 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลำดับที่	ชื่อผลิตภัณฑ์	ชื่อผู้นำเข้า	ชื่อผู้ผลิต	วันที่ได้รับอนุญาต (วัน/เดือน/ปี)	เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี
63	2019-nCoV Antigen Rapid Test รหัสสินค้า U20229	บริษัท ทีเอ็มวายเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล บิโอดี กรุ๊ป จำกัด	Ustar Biotechnologies (Hangzhou) Ltd. China	3/9/2564	T 6400334
64	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits (Colloidal Gold Immunochromatography) รหัสสินค้า CG2701 , CG2705 , CG2725	บริษัท ซูวี่เทค จำกัด	Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd., China	3/9/2564	T 6400335
65	Nano Repro SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test รหัสสินค้า B66000	บริษัท บราวน์ แมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด	NanoRepro AG, Germany	6/9/2564	T 6400336

ติดต่อ

**EPICO PHARM CO.,LTD.**

**Tel : 098 921 2824**

**Email : puk@epico-pharm.com**

**WhatsApp : +66989212824**

**LINE : puspiceys**

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

**บริษัท บราโว่ เมดิคอล เทค จำกัด**

**เลขที่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 38 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร**

**รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์ 0 2930 3300-1**